

## Probenversand zur Antikörperbestimmung bei Post-COVID Kids Bavaria

### Studienteilnehmern

(Versandtage ausschließlich **Mo, Di, Mi** !!! Sollten donnerstags oder freitags Proben genommen werden, bitte im Kühlschrank lagern und am Montag versenden, Danke.)

#### **Die Verpackung besteht aus 3 Komponenten:**

- 1) Primärverpackung = Probengefäß (2,7 ml Serum-Monovette oder Vacutainer; etikettiert/beschriftet mit 4-stelliger Proben-ID, die bei der Studienhotline 0941-369 95700 zu erfragen ist)
- 2) Sekundärverpackung = Schutzgefäß (flüssigkeitsdicht verschraubtes Kunststoffröhrchen mit ausreichend saugfähigem Material)
- 3) Außenverpackung = Kistenförmige Verpackung (z.B. aus Kartonage)



#### **Beschriftung der Verpackung:**

- DHL Retourenlabel (siehe [www.we-care.de/focokiba](http://www.we-care.de/focokiba), Buchungsmaske für DHL Retourenlabel) mit Namen und Anschrift des Absenders (z.B. Arzt, Praxis, Klinik) und Telefonnummer einer verantwortlichen Person (bitte Zeile „Namenszusatz“)
- Gefahrgutkennzeichen (siehe unten) bitte ausdrucken (Maße der Raute mind. 5 x 5 cm), ausschneiden und auf den Karton kleben

